


PRZEKŁUWANIE NOSA INSTRUKCJA

UWAGA:

Aparat jest przeznaczony do przekłuwania WYŁĄCZNIE SKRZYDEŁEK NOSA.
Nie należy próbować przekłuwać aparatem przegrody nosowej.


PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ZABIEGU PRZECZYTAJ
UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ!

1. Określ miejsce przekłucia. Poproś klienta, by wzięły głęboki wdech przez nos. Odpowiednim miejscem do przekłucia jest ta część nosa, która unosi się podczas oddychania (Rys. 1).

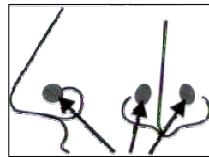


Rys. 1 Zalecane miejsca przekłucia

2. Zaznacz miejsce przekłucia nietoksycznym pisakiem chirurgicznym (Rys. 2).

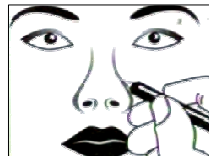

Rys. 2


3. Umyj dokładnie ręce i oczyść skrzydełko nosa gazikiem do dezynfekcji (Rys. 3).

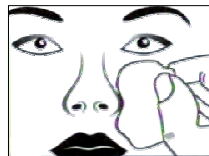

Rys. 3


4. Otwórz sterylne opakowanie i wyjmij aparat do przekłuwania nosa.

5. Wypożyczonuj aparat – mniejsza końcówka powinna być umieszczona wewnątrz nosa i przytrzymywana kciukiem (Rys. 4).

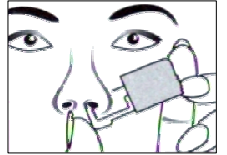


Rys. 4

6. Dociśnij delikatnie aparat, aby wycelować kolczyk – jego końcówka powinna dotknąć skrzydełka nosa (Rys. 5). Aparat powinien być umieszczony prostopadle do powierzchni nosa. Nie dociskaj aparatu, dopóki nie upewnisz się, że znajduje się on w prawidłowej pozycji do przekłucia nosa.

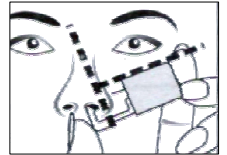


Rys. 5

7. Aby przekłuć nos, ściśnij aparat zdecydowanym ruchem (Rys. 6). Kolczyk zostaje umieszczony w nosie w ciągu 1/10 sekundy.

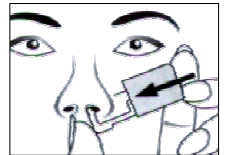


Rys. 6

8. Zwolnij nacisk na aparat (Rys. 7) i wysuń go z nosa ruchem pionowym w dół (Rys. 8).

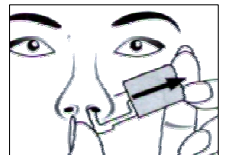

Rys. 7

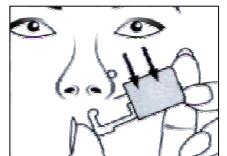

Rys. 8